

# fluorecare® SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay) **GUIA RÁPIDA**

1


## Empleando exudado con hisopo

### 1.1 Ilustración de Muestreo con hisopo Exudado nasofaríngeo)



1. Incline la cabeza del paciente hacia atrás y recoja la muestra de la fosa nasal que tiene más moco (la cabeza debe estar inclinada desde la vertical para una correcta recolección de la muestra).
2. Inserte el hisopo a través de la entrada de la fosa nasal y luego muévase lentamente a lo largo de la parte inferior de la cavidad nasal (Muévase suavemente a fin de evitar cualquier hemorragia traumática).
3. Cuando la punta del hisopo llegue a la pared posterior de la cavidad nasofaríngea, gírelo suavemente varias veces. (Recoja tanta secreción como sea posible)
4. Para evitar la tos refleja, deténgase un minuto.
5. Retirar suavemente el hisopo.
6. Realice el ensayo a la mayor brevedad posible.

### 1.2 Preparación de la muestra y ensayo

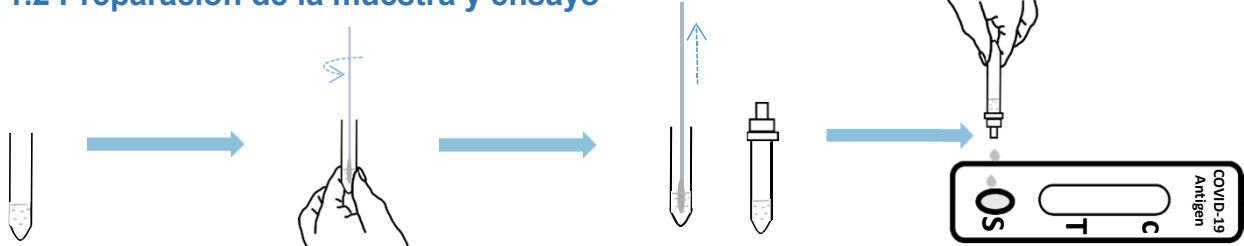

1 Añadir 300µL de Sol. Tratamiento de la muestra en cada tubo de extracción\*.

2 homogeneizar frotando el hisopo sobre las paredes del tubo con solución al menos 10 veces..

3 Retire el hisopo y aplique el tapón gotero con filtro.


4 Añadir 2 gotas (120µL) muestra pretratada sobre la ventana de muestra (S). Leer los resultados tras 15 min a T<sup>a</sup>.A.

\* Si debe de utilizar una pipeta de plástico desechable incluida en el kit para obtener la solución de muestra, repita tres veces (100µL cada vez) hasta conseguir el volumen total deseado 300µL en el tubo de extracción.

2

## Empleando Medio de Transporte Viral

### Preparación de la muestra y ensayo

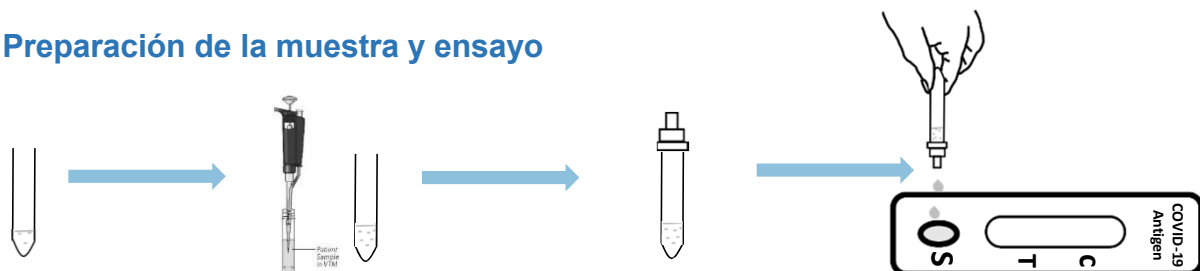


1 Añadir 100µL de Sol. Tratamiento de la muestra en cada tubo de extracción\*.

2 Tomar 100µL de la muestra contenida en MTV en el tubo.

3 aplique el tapón gotero con filtro.


4 Añadir 2 gotas (120µL) muestra pretratada sobre la ventana de muestra (S). Leer los resultados tras 15 min a T<sup>a</sup>.A.

En caso de tener que utilizar las pipetas desechables para obtener la muestra del MTV, siga las instrucciones que a continuación se indican:

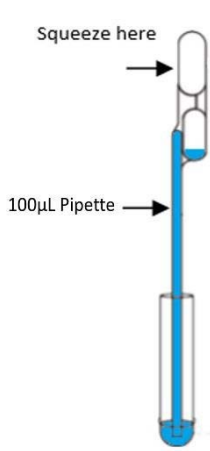

### Carga de la Pipeta:

1. Apriete completamente el bulbo superior, inserte la punta de la pipeta en la solución de muestra (VTM) y libere el bulbo suavemente.
2. Asegúrese de que la pipeta se ha llenado completamente con la solución de la muestra (VTM) (hasta observar parte de fluido en el bulbo inferior. Evite la presencia de burbuja sobre el capilar de la pipeta).

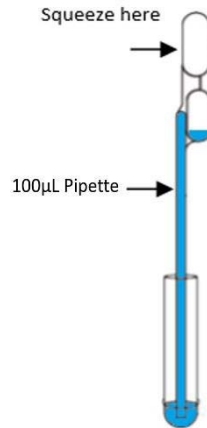


### Dispensación de la Pipeta:


1. Dispensar 100µL de muestra contenida en el MTV en el interior del tubo de extracción.
  2. Apriete lentamente bulbo superior de la pipeta hasta dispensar completamente el volumen de muestra en MTV contenido en el capilar de la pipeta de transferencia.
- Nota: es posible que pueda quedar algo en el bulbo inferior, que no afectará al resultado del ensayo.

## 3


## Interpretación de Resultados

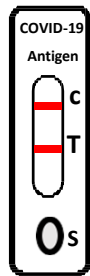

Positivo

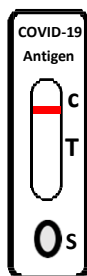

Negativo

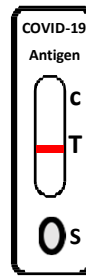

Invalido

